



こんなときにはAED!!

●意識がない ●呼吸がない ●脈拍なし（医療従事者のみ）

① ふたを開けると、電源ON！



フタを開ける



「成人モードです。意識・呼吸を確認してください。胸を裸にして、AEDのフタから四角い袋を取り出してください。袋を破いて、パッドを取り出してください。パッドを青いシートからはがして図のように右胸と左わき腹に貼ってください。」

フタを開けると100回/分の動作音が始まります。

重要




成人を救助する時⇒成人モード

小児（未就学児）を救助する時⇒小児モード



成人・小児モード切替スイッチ

② パッドを体に貼ります

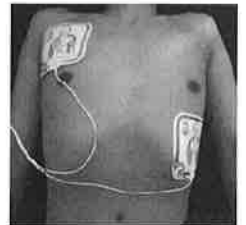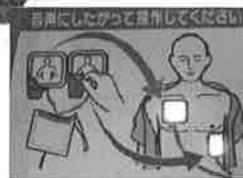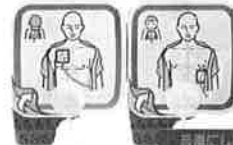

パッドを貼ると、自動的に心電図の解析を開始します。AEDの音声ガイドに従ってください。

「体にさわらないでください。心電図を調べています。体にさわらないでください。」

電気ショックが必要な心電図の場合

「電気ショックが必要です。充電しています。」

電気ショックが不要な心電図の場合

「電気ショックは必要ありません。体にさわっても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

③ ショックボタンを押します



「体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。」

「電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

人工呼吸の訓練を受けており、技術と意思があれば胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を交互に2分間行います。



胸骨圧迫

30 : 2



人工呼吸

普段どおりの呼吸が戻った場合は、身体を横向きにして救急隊員の到着を待ちます。（電極パッドは貼ったままにしてください。）

